



Präanalytik ¹³C-Harnstoff Kapsel Helicobacter Atemtest

Bitte senden Sie uns für die Bestellung von ¹³C-Harnstoff-Kapseln à 75 mg ein Privatrezept mit Praxisstempel und Unterschrift zu.

Durchführung:

Patientenvorbereitung	Der Patient sollte seit 4 – 6 Stunden nüchtern sein.
Testvorbereitung	Beschriften Sie den Atembeutel auf dem dafür vorgesehenen Etikett mit Name, Vorname und Geburtsdatum des Patienten. Lösen Sie die ¹³ C-Harnstoff-Kapsel in 200 ml Orangen- oder Apfelsaft auf.
1. Probennahme (vor Einnahme des Testgetränkes)	Die blaue Verschlusskappe vom weißen Schlauch abnehmen und auf jeden Fall durch das <u>beiliegende Mundstück</u> (enthält Rückschlagventil) ersetzen. Jetzt die eine Seite des Atembeutels (1) mit einem Mittelatemstoß aufblasen lassen. Danach Schlauch unterhalb des Mundstücks zusammenpressen, Mundstück abnehmen und Schlauch wieder mit der blauen Verschlusskappe fest verschließen.
Anschließend den Patienten das Testgetränk zügig einnehmen lassen.	
2. Probennahme (nach Einnahme des Getränkes)	30 Minuten nach Einnahme des Testgetränkes die andere Seite des Atembeutels (2) mit einem Mittelatemstoß aufblasen. Weiteres Vorgehen, wie oben beschrieben!
Probenversand	Mit einem Überweisungsschein / Probenbegleitschein in die Laborpraxis schicken. Anforderung: ¹³ C-Atemtest mittels Harnstoff Kapsel