



Wichtige Information

13.02.2017

Helicobacter pylori

Vertrauen ist gut – Nach-Kontrolle ist sicher

Sehr geehrte Frau Doktor, sehr geehrter Herr Doktor, sehr geehrtes Praxisteam,

gemäß der neuen DGVS Leitlinie Hp 2016 soll die Eradikationskontrolle nach jeder Therapie der Helicobacter pylori-Infektion erfolgen (*Quelle: DGVS Kongress 2015, Leipzig*).

Um die Eradikationskontrolle von *H. pylori* zu vereinfachen, stellen wir die Atemtestdiagnostik um, in dem die Harnstoffkapsel durch die **Diabact® UBT- Tablette** ersetzt wird. Durch den unkomplizierten Einsatz der Diabact® UBT- Tablette als ¹³C-Substrat für den Atemtest ergeben sich für Sie und Ihre Praxis viele Vorteile:

- Einnahme der Kapsel (enthält bereits Citrat) mit Wasser – kein Fruchtsaft
- Nur 10 Minuten Wartezeit nach Einnahme der Kapsel
- Abrechnung

Fachrichtung	Bezeichnung	EBM-Ziffer	Gebührensatz	GOÄ-Ziffer	2,3-fach
Allgemeinärzte	Bezug von Harnstoff	40154	25,60 €	A 619 +Materialkosten	23,82 €
Fachärzte	Bezug von Harnstoff Testdurchführung	40154 02400	25,60 € 2,40 € 28,00 €	A 619 +Materialkosten	23,82 €

Bitte beachten:

- vorhandene Harnstoffkapseln können aufgebraucht werden
- **auf dem Ü-Schein und dem Beutel** vermerken, ob für den Atemtest eine Harnstoffkapsel oder die Diabact® UBT- Tablette verwendet wurde - da es Einfluss sowohl auf die Messung als auch auf die Referenzbereiche hat.

Referenzbereich Diabact® UBT	Präzision	negativ	positiv
	± 0,2 ‰ Δ δ-Wert	<1,3 ‰ Δ δ-Wert	>1,7 ‰ Δ δ-Wert

- Bestellung Diabact® UBT- Tablette über Apotheken oder direkt beim Großhandel CDS (Bestellformulare unter Tel.: **06894 9550-440**)
- Bestellung Atem-Beutel unter Tel.: **06894 9550-440**
- Für Kinder ist der Diabact-Test erst ab einem Alter von > 6 Jahren anwendbar.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ansprechpartner: Dr. Elena Hoff 06894 9550 322

Mit freundlichen Grüßen Ihr Labor Team

