

// Wichtige Information:

Bezüglich Befüllung der Probengefäße

Bioscientia MVZ Labor Saar GmbH
Otto-Kaiser-Str. 8a
66386 St.Ingbert

Tel.: 06894 9550-100
Fax: 06894 9550-109

service@mvz-labor-saar.de
www.mvz-labor-saar.de

Dienstag, 11. April 2023

Sehr geehrte Frau Doktor,
sehr geehrter Herr Doktor,
sehr geehrtes Praxisteam,

Wir sind auf Ihre Mithilfe angewiesen.

In letzter Zeit gehen in unserem Labor häufiger Proben ein, die nicht korrekt befüllt sind. Ebenfalls auch häufig geronnene EDTA Proben.

Um Ihre Laborproben korrekt auswerten zu können, bitten wir Sie folgendes zu beachten.

- Citrat Röhrrchen immer bis zur Markierung füllen und das Röhrrchen vor der Entnahme einmal leicht vorziehen. Falls bei der Blutentnahme mit einer Multifly Kanüle Citrat als erstes entnommen wird, bitten wir Sie - um Totvolumen zu vermeiden - zuerst ein Leerröhrrchen aufzuziehen und dies anschließend zu verwerfen.
- Alle Röhrrchen mit Antikoagulantien (z.B. EDTA) Röhrrchen bitte direkt nach der Entnahme mehrfach schwenken um eine Gerinnsel Bildung zu vermeiden. Nur so können die Proben, z.B. Blutbilder, korrekt ausgewertet werden.



Markierungslinie

Für Rückfragen stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team der Bioscientia Labor Saar GmbH



Röhrrchen unterfüllt/ korrekt befüllt



Röhrrchen mit Gerinnsel-Bildung