

// Wichtige Information:

Bioscientia MVZ Labor Saar GmbH
Otto-Kaiser-Str. 8a
66386 St.Ingbert

Tel.: 06894 9550-100
Fax: 06894 9550-109

service@mvz-labor-saar.de
www.mvz-labor-saar.de

Montag, 4. September 2023

Umstellung der Abstrich-Systeme für mikrobiologische Untersuchungen

Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,
sehr geehrtes Praxisteam,

Umstellung der Abstrich-Systeme zum 01.09.2023

Wir haben uns dazu entschlossen, die Abstrich-Systeme für die kulturelle mikrobiologische Diagnostik zu modernisieren. Die Systeme der Fa. Copan bieten durch die optimale Abgabe der Mikroorganismen vom Tupfer eine bessere Nachweisrate für aerobe und anaerobe Mikroorganismen.

Ab September erhalten Sie bei der Bestellung bakteriologischer Abstrichtupfer die neuen Systeme **eSwab® regular** bzw. **eSwab® urethral**. Ihre noch vorhandenen Abstrichtupfer können Sie gerne noch vollständig aufbrauchen.

eSwab® regular 490 CE.A
mit dickem Abstrichtupfer



eSwab® urethral 481CE
mit dünnem Abstrichtupfer



Handhabung der neuen eSwab Systeme:

- Den Abstrichtupfer in das Röhrchen mit dem flüssigen Amies-Medium geben und an der markierten Sollbruchstelle abbrechen.
- Anschließend das Röhrchen fest verschrauben, der Tupfer verbleibt im Röhrchen und steckt im Deckel.
- Die Proben - wie gewohnt - bei Raumtemperatur, bis zur Abholung lagern.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Für Rückfragen stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team der Bioscientia Labor Saar GmbH