



## Präanalytik Diabact UBT Tablette Helicobacter Atemtest

<b>Bestellung:</b>	Bestellung von $^{13}\text{C}$ -Harnstoff- Diabact- UBT Tabletten à 50 mg erfolgt beim CDS Versorgungs-GmbH, bzw.in einer Apotheke.
--------------------	---

### Kurzanleitung zur Durchführung des $^{13}\text{C}$ -Atem-Tests in Ihrer Praxis

<b>Patientenvorbereitung</b>	Der Patient sollte seit 4 – 6 Stunden nüchtern sein, in den letzten 2 Wochen keine ProtonenpumpenInhibitoren (PPI) eingenommen haben und frühestens einen Monat nach einer Antibiotika-Therapie.
<b>Testvorbereitung</b>	Beschriften Sie den Atembeutel auf dem dafür vorgesehenen Etikett mit Name, Vorname und Geburtsdatum des Patienten.
<b>Probennahme (I)</b> (vor Einnahme des Testgetränkes)	Die Verschlusskappe vom weißen Schlauch abnehmen und auf jeden Fall durch das <b>beiliegende Mundstück</b> (enthält Rückschlagventil) ersetzen.  Jetzt die eine Seite des Atembeutels (1) mit einem Mittel-Atemstoß aufblasen lassen.  Danach Schlauch unterhalb des Mundstücks zusammenpressen, Mundstück abnehmen und Schlauch wieder mit der Verschlusskappe fest verschließen.
<b>Anschließend den Patienten eine Diabact UBT-Tablette unzerkaut mit etwas Wasser (ca. ein Glas) einnehmen lassen.</b>	
<b>Probennahme (II)</b> (nach Einnahme der Tablette)	10 Minuten nach Einnahme die andere Seite des Atembeutels (2) mit einem Mittelatemstoß aufblasen. Weiteres Vorgehen, wie oben beschrieben!
<b>Probenversand</b>	Mit einem Überweisungsschein / Probenbegleitschein in die Laborpraxis schicken. Auftrag: Diabact $^{13}\text{C}$ -Atemtest