



BIOSCIENTIA
MVZ LABOR SAAR

Otto-Kaiser-Str. 8a
66386 St. Ingbert
Tel.: 06894/9550-0

Präanalytik

Handhabung gefrorener Proben

Die Kühlbox mindestens 2 Tage vor der Probenentnahme bestellen.

Das in der Styroporbox enthaltene Kühllakku muss für mindestens 24 Stunden **liegend** eingefroren werden.

Nach der Probenahme die Probe (je nach Anforderung ggf. zentrifugieren und abseren/jeweilige Präanalytik beachten!) mindestens 2 Stunden separat einfrieren, bevor sie zusammen mit dem gefrorenen Kühllakku in die Styroporbox gegeben wird. (Probenbeschriftung nicht vergessen: Name/Barcode und Probenmaterial)

Die Kühlbox **mit dem Überweisungsschein** und dem evtl. zusätzlichen Probenmaterial **in einen Versandbeutel** packen und dem Fahrdienst mitgeben.